

eva/q_{lu}[®]

eva/q_{lu}[®]
Bambini
dla dzieci

SZYBKĄ DWÓJKĄ

INNOWACYJNE CZOPKI PRZECIW
ZAPARCIOM DLA DOROSŁYCH I DZIECI



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Eva/qu czopki przeciw zaparciom dla dorosłych. Eva/qu Bambini czopki przeciw zaparciom dla dzieci.

Producent: So. Se. Pharm S.R.L. Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy

Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o. ul. Zakątek 1, 05-270 Marki,

<http://www.evaqu.pl>, <http://www.solpharm.pl>

INNOWACYJNE CZOPKI

eva/qu®

eva/qu®
Bambini
dla dzieci

ŁAGODNA I BEZPIECZNA METODA NA ZAPARCIA

Najcenniejsze zalety!

- 1 Pozwalają zaplanować moment wypróżnienia
- 2 Szybki efekt, od kilku do kilkunastu minut
- 3 Bez przeciwwskazań do stosowania
- 4 Nie zawierają składników przeczyszczających
- 5 Nie wywołują efektu uzależnienia



Na problemy z zaparciami sprawdzony sposób: czopki Eva/qu®. W celu uzyskania dodatkowych informacji o wyrobie medycznym Eva/qu Bambini i Eva/qu proszę zeskanować zamieszczony obok kod QR

Czopki
Eva/qu Bambini

DZIECI

2+

Czopki
Eva/qu

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

12+

Czopki Eva/qu® i Eva/qu Bambini®: Skład: dwuwęglan sodu i dwuwęglan potasu zawieszony w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie. **Postać:** czopki doodbytnicze. **Działanie:** czopek po wprowadzeniu do odbytu rozpuszcza się w ciągu kilku minut, uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikroperłeczek, które wywierają nacisk, rozszerzają ścianki bańki odbytnicy i powodują jej odruchowy skurcz. Rozpuszczony czopek dodatkowo zmniejsza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu wypróżniania się. **Spособ użycia:** wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia. Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia. Ale ważne jest, aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżnienia. Pomocne będzie poruszenie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej. **Wskazania:** Czopki Eva/qu Bambini zalecane są dla dzieci pomiędzy 2. a 12. rokiem życia, a czopki Eva/qu dla młodzieży i dorosłych po 12. roku życia, w przypadku opóźnienia regularnego rytmu wypróżnienia zarówno powtarzającego się jak i okazjonalnego. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne, bez obecności substancji wchłanianych przez organizm powoduje, że czopki Eva/qu są szczególnie zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych. Zastosowanie czopków pomaga w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi oraz rektoskopią. Zapobiegają powstawaniu zaparć w podróży. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy, pęknięciom skóry czy hemoroidom. **Przeciwwskazania:** brak jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopki składają się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol jest substancją obojętną, nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną. **Specjalne środki ostrożności:** uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają. Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywoływać podrażnienie. Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może wskazywać na inny problem (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z składników. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. **Dostępne opakowanie:** 6 czopków. **Producent:** So. Se. Pharm S.R.L. Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy. **Dystrybutor:** Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki, www.evaqu.pl, www.solpharm.pl. **Status:** CE Wyrób Medyczny